



## Manuel d'utilisation

Modèle : Electro-stimulateur anti-douleurs  
télécommandé Vivality

# À LIRE AVANT UTILISATION

## ■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

## ■ CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 142x61.5mm
- Rechargement USB
- Intensités : 15
- Modes de massage : 6
- Télécommande

Type de pile : pile bouton CR2032

Tension de sortie : 54V

Courant de sortie : 0-45MA

## ■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- N'utilisez jamais cet appareil près du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits très humides tels que la salle de bain.
- Peut avoir besoin d'être utilisé sous la supervision d'un médecin.
- Seulement pour usage externe.
- Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous recevez d'autres traitements médicaux.
- N'utilisez pas cet appareil en dormant, en conduisant ou en vous baignant.
- Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec un objet métallique, boucle ou bijou.
- Ne pas utiliser, si vous avez un implant dans le corps, avez une arythmie cardiaque ou un trouble de l'impulsion cardiaque, avez un trouble épileptique, êtes enceinte ou avez un cancer.

## ■ DESCRIPTION GENERALE

### Qu'est ce que l'EMS ?

Stimulateur musculaire électrique, qui tonifie les muscles et se détend.

Il est reconnu comme une méthode cliniquement prouvée, efficace et non médicamenteuse pour fortifier les muscles.

Il gère le renforcement, la tonification et la raffermissement des muscles.

Il est également exempt d'effets secondaires lorsqu'il est utilisé correctement, et peut également être utilisé comme un simple moyen d'auto-formation.

Cette méthode est scientifiquement étayée et médicalement approuvée.

### Changement de la pile

Utilisez une pile CR2032 (non incluse).

Retirez le cache de la télécommande à l'aide d'un outil fin.

Insérez la pile en veillant à respecter les polarités. Replacez le cache.

## Pads

Les pads de gel sont consommables, remplacez-les par des neufs dans les conditions suivantes :

- ouvert depuis plus d'un mois ou utilisé plus de 30 fois.
- l'adhésivité est perdue, des résidus secs ou sales ne peuvent pas être éliminés.

## Utilisation


1. Nous vous suggérons une utilisation quotidienne.
2. Le produit s'éteint automatiquement après 120 secondes sans contact avec la peau.
3. Fixez le pad de gel à l'emplacement où vous souhaitez, comme le cou ou l'abdomen par exemple.
  - \* Essuyez toute transpiration de la zone tactile avant utilisation.
4. Connectez l'appareil et allumez-le.
  - \* Insérez la pile dans la télécommande, Appuyez sur le bouton principal de l'appareil, puis appuyez sur le bouton de la télécommande, l'appareil démarre.
  - \* Arrêt automatique après environ 15 minutes.
5. Réglage de l'intensité.
  - \* Au total 6 modes, 15 niveaux d'intensité.

## **Comment programmer les différents modes à partir de la commande**

1. Appuyez longuement pour allumer l'appareil principal, la lumière s'allume.
2. Appuyez sur le bouton M de la télécommande pour sélectionner le mode.

3. Appuyez sur + pour augmenter l'intensité de 0 à 15, vous pouvez régler l'intensité avec un niveau approprié lorsque vous vous sentez bien, puis appuyez sur - pour diminuer.

4. 6 modes, un mode différent avec un nombre de lumière et d'intensité différent s'affiche sur l'écran LCD de la télécommande.

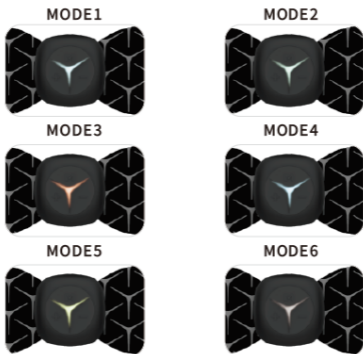

5. Eteignez et retirez le pad de votre corps.

\* Appuyez sur le bouton principal de l'appareil pour l'éteindre.



**eko™**

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.  
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE  
[www.eko-concept.eu](http://www.eko-concept.eu)

**APPROVEDBYEKO**

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine  
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !  
Please recycle the package. Thanks !*