



Manuel d'utilisation

Modèle : Thermomètre infrarouge mural

À LIRE AVANT UTILISATION

■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps.

■ CARACTÉRISTIQUES

Appareil de mesure de température autonome et sans contact

Mesure la température corporelle à une distance de 1 à 10 cm

Ecran digital avec alarme sonore

Plage de mesure : 32°C à 43°C (89°F - 109.4°F)

Grand écran LED pour une lecture facile des résultats

Temps de réponse : 1sec

Indicateur de température LED (vert : température normale, rouge : température élevée)

Alerte sonore

Mode de veille automatique (après 10 secondes sans mouvement)

Lorsqu'un mouvement se produit, le thermomètre repasse en mode actif

Précision : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)

Peut être utilisé sur piles (3x 1,5V Alkaline) ou sur secteur

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d'objets pointus ou métalliques près du produit.
- Si le produit n'a pas été utilisé depuis longtemps, veuillez remplacer les piles.
- Ne placez pas la pile près d'une source de chaleur et ne la jetez pas dans le feu, cela peut provoquer une explosion.
- Ne maintenez pas votre front contre l'appareil pendant la mesure.
- Veillez à ce que les cheveux ne cachent pas la zone mesurée. Cela pourrait fausser le résultat.
- Ne pas utiliser en extérieur ou au soleil.
- Le résultat ne remplace pas le diagnostic d'un médecin, il est seulement indicatif.
- Il n'y a pas de température standard, veuillez contacter un médecin si vous présentez de la fièvre.
- Lorsqu'il vient d'être placé dans une nouvelle pièce, veuillez attendre 20 minutes avant d'utiliser l'appareil.

■ UTILISATION


Remplacement des piles



Ouvrez le cache de la pile et insérez 3 piles 1,5V Alkaline en respectant les polarités.

Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables. Aussi, des piles alkaline sont préférables.

Description du produit

La température corporelle du sujet mesuré est affichée en mesurant le rayonnement thermique du front.

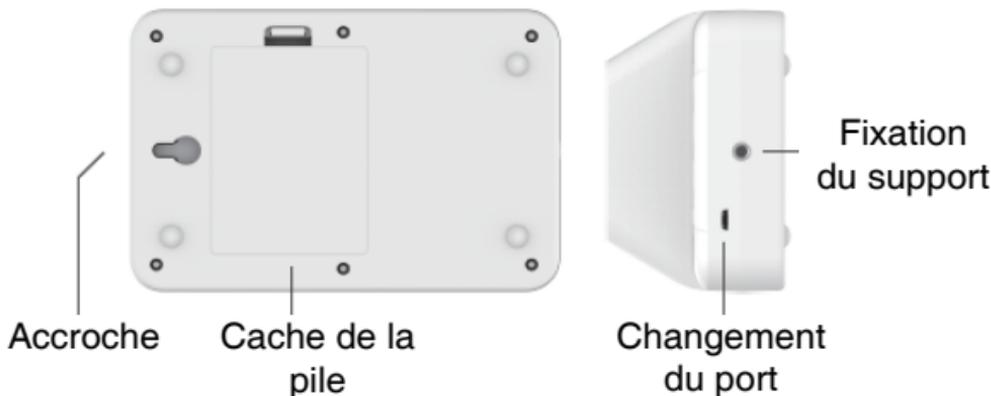

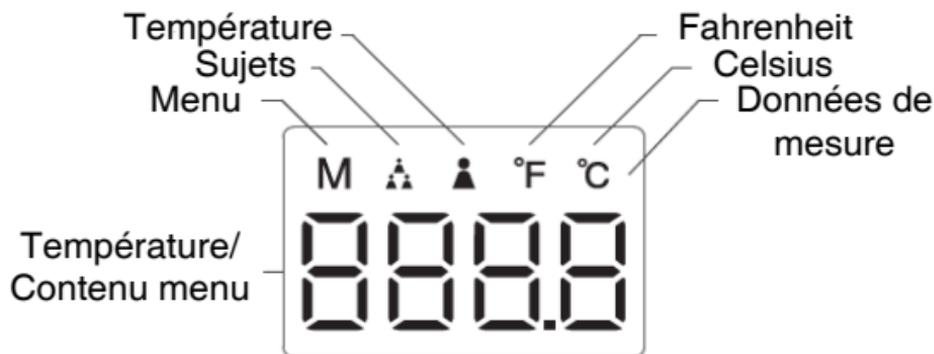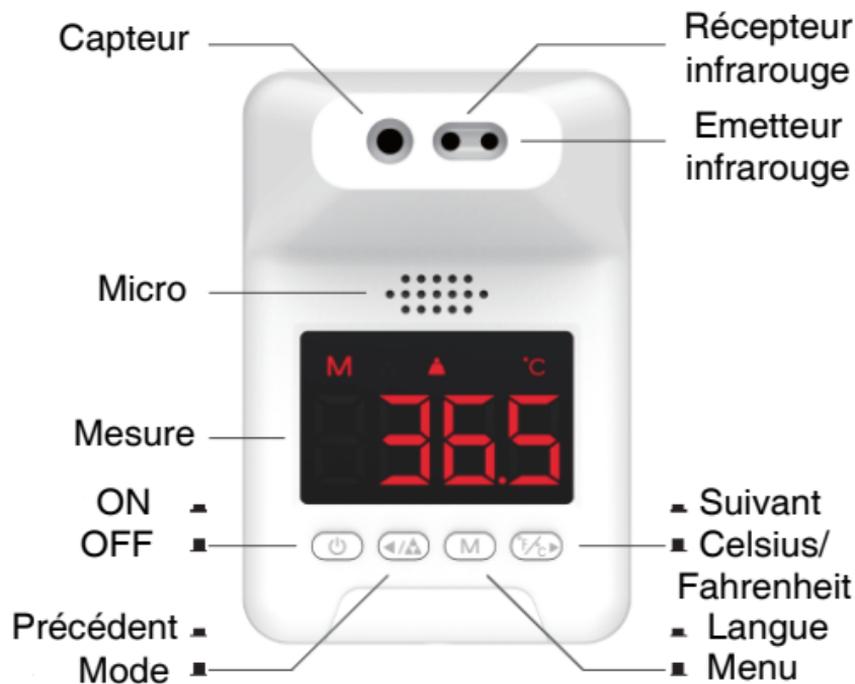

Inspection préventive

Le thermomètre doit être étalonné avant la mesure pour vérifier le fonctionnement de chaque composant et maintenir les bonnes performances du thermomètre.

Vérifiez que le produit dispose bien de pile ou qu'il soit bien branché sur une prise secteur.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton Power pour allumer le thermomètre. L'écran s'allumera comme sur le schéma 6-1.
- Changez le mode du thermomètre sur Température et mesurez votre température comme sur le schéma 6-2.
- Alignez la sonde du thermomètre au milieu du front et maintenez-la verticale, la distance est d'environ 5 à 10 cm, comme indiqué sur la figure 6-3
- Démarrez la mesure. Lorsque le capteur est scanné, les données de mesure s'affichent à l'écran et une indication vocale est donnée.
- Si la température corporelle dépasse le point d'alarme de température, le système diffusera une alarme vocale.

Description des résultats de mesure.



Figure 6-1

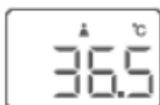


Figure 6-2

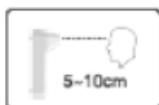


Figure 6-3



Figure 6-4



Figure 6-5

Température

- «Lo» est affiché sur l'écran lorsque la température est inférieure à 32.0°C.
- La température est entre 32.0 et 37.5°C : une voix indique «Normal temperature».
- La température est entre 37.6 et 38.2°C : l'appareil sonne deux fois et une voix indique «High temperature» (haute température)
- La température est entre 38.3 et 42.9°C : l'appareil sonne trois fois et une voix indique «Super high temperature» (très haute température)
- «Hi» est affiché sur l'écran lorsque la température est supérieure à 42.9°C.

Les valeurs de température affichées peuvent varier selon la couleur de peau, la partie du corps scannée ou encore la température ambiante.

Menus

Page précédente

Appuyez sur le bouton «<» Précédent pour afficher toutes les statistiques actuelles. Maintenez le bouton «<» Précédent pour alterner entre les modes Single et Multi-Player.

Mémoire

Appuyez sur le bouton M pour sélectionner la langue. Maintenez le bouton pour entrer dans le menu Options, et vérifiez les données de température en appuyant sur les boutons Droite et Gauche.



eko™

Copyright EKO ©. All Rights Reserved.
JG FASHION SARL | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.eko-concept.eu

APPROVEDBYEKO

Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.

*Produits importés par JG FASHION SARL. Fabriqué en Chine
Imported by JG FASHION SARL. Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*

Page suivante

Appuyez sur le bouton «>» Suivant pour afficher la page suivante. Maintenez le bouton «>» Suivant pour alterner entre la mesure Fahrenheit ou Celsius. Lorsque le produit est en veille, appuyez sur ce bouton pour lancer la mesure de température.

Power

Appuyez sur le bouton Power pour lancer la mesure de température.

Maintenez le bouton pour éteindre le produit.